

IMPACT

Kavitace poslední generace




IMPACT je přístroj k ošetření těla navržený společností SORISA, určený ke zmenšení objemu lokálního nahromaděného tuku pomocí procesu kavitace v tukové tkáni prostřednictvím ultrazvuku o vlnové délce 40 KHz.

Tento přístroj navíc obsahuje elektroporaci, která doplňuje ošetření prostřednictvím pronikání zpevňujících a anticelulitických produktů.

Co je to kavitace?

Kavitací se označuje proces uvnitř tekutého prostředí nebo biologické tkáně, který je způsobený zvukovou vibrací. Tvoří se mikroskopické bubliny, které se zvětšují a nakonec uvolní svůj obsah (imploze), čímž mechanicky působí na tkáň, do které uvolní energii, kterou zadržovaly.

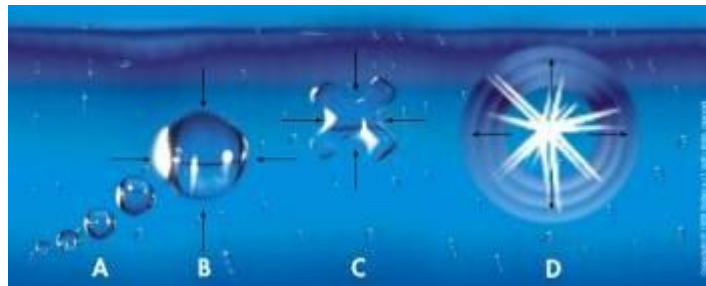

Během procesu kavitace se tvoří bubliny

A – fáze slučování, tvoří se bubliny


B – fáze růstu, zvětšování objemu

C – objevují se nedokonalosti


D – fáze uvolnění energie

Efekty kavitace

- Zeštíhlující efekt (rozbití adipocytů)

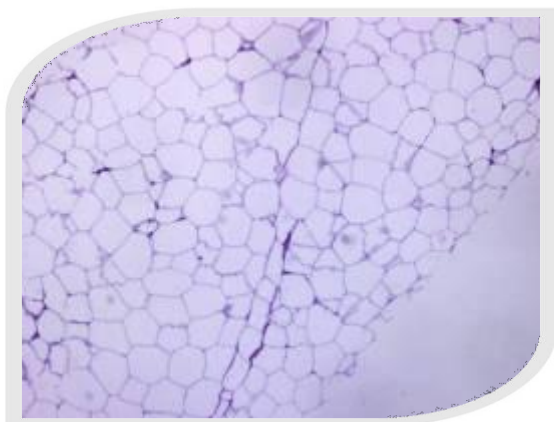

Histologický průřez tukovou tkání

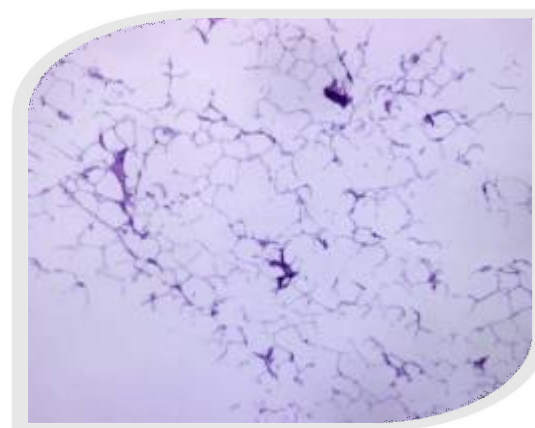


Histologický průřez tukovou tkání po kavitaci
(proměna tukové buňky do tekutého stavu)

Co je to elektroporace?

Elektroporace přechodně otevře mikroskopické membrány ve vnější vrstvě kůže, které umožňují průchod sloučenin o vysoké molekulární hmotnosti do buňky.

(L. Patterson, 2005 D. Stevenson, 2006)

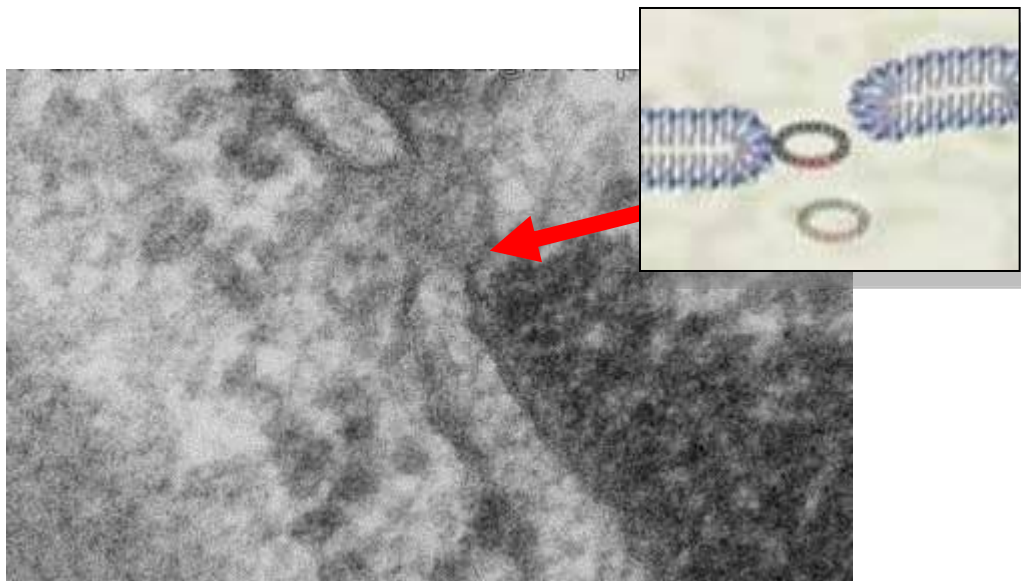

Pór v buněčné membráně

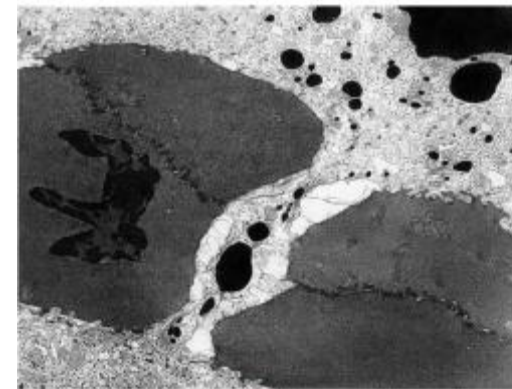


Figura 3. Formación del poro intercelular en la zona del folículo piloso por ruptura de las uniones gap con paso masivo de tinta china M.E. 5000x.

Mezibuněčný kanál

OŠETŘENÍ



TĚLOVÁ OŠETŘENÍ v komplexní formě

- 1) Lokálně nahromaděný tuk
 - 2) Celulitida
 - 3) Ochablost
- Ošetření navržená na 10 sezení (1 a 2 týdně)



Ošetření IMPACTEM



IMPACT=Vynikající výsledek LOKÁLNĚ NAHROMADĚNÝ TUK

Ošetření IMPACTEM



+



IMPACT + Gel G5 = Vynikající výsledek CELULTIDA

Ošetření IMPACTEM



+



IMPACT + ToneActif Gel = Vynikající výsledek OCHABLOST

Ošetření IMPACTEM



+



1° Aplikace kavitace a elektroporace

2x (15 a 20 min.)

2° presoterapie- drenáž

20 min.

Použití přístroje



Stehna



Hýždě



Záda



Paže

Pro různé části těla

VÝSLEDKY





Žena 42 let

Počet ošetření: 10

Ošetřovaná část: boční strana
stehen



Kavitace mezi 70% a 80%

Elektroporace 60% s Gelem ToneActif

Úbytek 6 cm



Žena 45 let

Počet ošetření: 10

Ošetřovaná část: břicho



Kavitace mezi 70% a 80%

Elektroporace 65% s Toneactif Gelem

úbytek 2 cm přes břicho



Zlepšení kvality pokožky a tonizace tkáně.



Žena 45 let

Počet ošetření: 4

Ošetřovaná část: břicho



Kavitace mezi 80% a 90%

Elektroporace 75% s Gelem G5

Úbytek 8 cm přes břicho

SHRNUTÍ



Proč byste měli věřit IMPACTU?

- Kavitace o vlnové délce 40KHz současně kombinovaná s elektroporací
- Dvě hlavice: jedna lineární druhá konkávní
- Dotyková obrazovka 14,5 cm
- Kalibrace rezonanční frekvence hlavic
- 45 přednastavených programů
- Vyzkoušené výsledky SORISA

Půjdeme to vyzkoušet?

